

# **INSTRUCCIONES PACIENTES DEL AFTER-CARE**

**exofin**<sup>®</sup>  
TOPICAL SKIN ADHESIVE

*Su herida a sido reparada usando el pagamento t3pico de alta viscosidad Exofin<sup>®</sup>. La lista abajo es una gu3a para que entienda y pueda cuidar su herida despu3s del procedimiento.*

## **1 Mantenga su herida seca.**

Usted puede mojar de vez en cuando y brevemente su herida en la ducha o el ba3o siguiendo las instrucciones de su medico, pero no empade o frote la herida. Despu3s de ba3arse, seque su herida cuidadosamente con una toalla suave.

## **2 Evite medicinas t3picas.**

No aplique ungüentos o medicinas liquidas, lociones, cremas, jalea de petr3leo, aceites minerals, o cualquier otro producto a su herida mientras la capa adhesiva de Exofin<sup>®</sup> este presente.

## **3 No frote, rasgu3e, o escoja en la herida.**

Al hacerlo puede comprometer la integridad del cierre de la herida y puede causar cicatrices.

## **4 Proteja su herida contra exposici3n prolongada al sol.**

No utilice l3mparas bronceadoras mientras la capa adhesiva este presente.

## **5 Check wound appearance.**

Hinchaz3n, rojez, y dolor son comunes con todas las heridas y normalmente desaparecer3n cuando la herida se cure. Si la hinchaz3n, la rojez o el dolor se siente caliente al tacto, contacte su medico. Tambi3n contacte su medico si los bordes de la herida se abren o se separan.

## **6 Exofin<sup>®</sup> naturalmente se mudara entre 5 y 10 d3as despu3s del procedimiento.**

Para entonces, su herida debe esta suficientemente curada. Esta informaci3n no debe sustituir el consejo de un medico. Para una informaci3n mas detallada, consulte a su medico. Su doctor puede elegir el mejor tratamiento para usted dependiendo sus circunstancias particulares.

*For additional questions and concerns, please consult your doctor.*